



Kliniderm® Foam Foam wondverband



BESTELINFORMATIE

Bestelnummer	Maat wondverband (wondkussen)	Uitvoering	Inhoud verpakking	Inhoud overdoos	ZI-nummer	ZI-memocode	Health Base code
4174810	5 x 5 cm	Foam	10 (10 x 1)	100 (10 x 10 x 1)	15546926	FOAMV5	FOAMV 5
4174811	10 x 10cm	Foam	10 (10 x 1)	100 (10 x 10 x 1)	15546934	FOAMV1	FOAMV 10
4174812	15 x 15 cm	Foam	10 (10 x 1)	100 (10 x 10 x 1)	15546950	FOAMV1	FOAMV 15
4174813	10 x 18 cm	Foam	10 (10 x 1)	100 (10 x 10 x 1)	15546942	FOAMV1	FOAMV 10
4174814	20 x 20 cm	Foam	10 (10 x 1)	100 (10 x 10 x 1)	15546969	FOAMV2	FOAMV 20
4174815	7,5 x 7,5 cm (4,5 x 4,5 cm)	Foam Border	10 (10 x 1)	100 (10 x 10 x 1)	15546977	FOAMV7	FOAMV 7,5
4174816	10 x 10 cm (5 x 5 cm)	Foam Border	10 (10 x 1)	100 (10 x 10 x 1)	15546985	FOAMV1	FOAMV 10
4174817	15 x 15 cm (10 x 10 cm)	Foam Border	10 (10 x 1)	100 (10 x 10 x 1)	15546993	FOAMV1	FOAMV 15
4174820		Foam Heel	5 (5 x 1)	40 (8 x 5 x 1)	15547000	FOAMV	FOAMV HEE



Wilt u meer weten over Kliniderm Foam of andere Klinion-wondverzorgingsproducten?

Bel met de gratis informatielijn van Medeco: 0800-022 82 82 (op werkdagen bereikbaar van 9.00-16.00 uur).



Kliniderm Foam wondverband

Voor een gunstig wondklimaat en snelle genezing

Kliniderm Foam behoort tot de laatste generatie foamverbanden en wordt geleverd in een versie zonder kleefrand, met kleefrand (Border) en hieluitvoering (Heel). Het foamverband is één van de meest gebruikte speciale wondbedekkers. Ze voelen comfortabel aan voor de patiënt, absorberen veel wondvocht zonder doorlekproblemen en kunnen enkele dagen op de wond blijven. Ze creëren tevens een gunstig klimaat voor snelle genezing.



Kliniderm Foam:

- ✓ sterk absorberend
- ✓ voorkomt maceratie
- ✓ verkleeft niet aan de wond
- ✓ huidvriendelijke microporeuze kleeflaag
- ✓ voorkomt trauma en pijn
- ✓ tot 7 dagen op de wond
- ✓ geschikt voor combinatietherapie

Groot absorptievermogen

Kliniderm Foam absorbeert veel wondvocht door directe opname in het foam en door de speciale toplaag met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid, die het overtollige wondvocht doorgeeft. Daarmee wordt maceratie voorkomen.

Voorkomt trauma

De Kliniderm Foam Border is voorzien van een hypoallergene kleeflaag voor een huidvriendelijke en zekere fixatie op de huid rondom de wond. Deze speciale laag is ontwikkeld om trauma en pijn tijdens het verwisselen te voorkomen.

Indicatie/applicatie

Kliniderm Foam wordt gebruikt bij de behandeling van acute en chronische wonden die matig tot veel wondvocht afgeven, zoals bijv. Ulcus Cruris, Decubitus, post-operatieve wonden, traumatische wonden en brandwonden.

Langdurig gebruik en bacteriën

Kliniderm Foam houdt een vochtig wondmilieu in stand, dat de wondgenezing stimuleert. Het wondverband kan tot max. 7 dagen op de wond blijven. Door opname van wondvocht worden tevens bacteriën in het wondverband ingesloten. Let op dat een gecontamineerde wond geen infectie wordt.

Combinatietherapie

Voorkom dat een gecontamineerde wond een infectie wordt door Kliniderm Foam (Border) een actieve werking te geven. Kliniderm Foam is zeer goed in combinatie te gebruiken met Mesitran Soft wondgel. Deze combinatie zorgt ervoor dat:

- schadelijke bacteriën die de wondgenezing belemmeren, worden gedood
- de onaangename geur (bij infectie) wordt geneutraliseerd
- de celgroei (fibroblasten en keratinocyten) wordt gestimuleerd
- de kans op littekenvorming wordt gereduceerd.

Gemakkelijk te fixeren

Gebruik voor het fixeren van het niet klevende foamverband: Kliniderm Film Xtrata wondfolie, Kliniplast EasyFix (geperforeerde fixatiepleister) of Klinifix Cohesive (niet verschuivend fixatiwindsel). Het foamverband is uitstekend in te zetten bij de behandeling van het ulcus in combinatie met Ambulante Compressie Therapie (A.C.T.).

Productinformatie



Kliniderm Foam is een comfortabel, sterk absorberend polyurethaan foamverband. Het wondverband verkleeft door de speciale foamstructuur niet aan de wond en voorkomt pijn en trauma tijdens het verwisselen van het wondverband. Door het creëren van een vochtig wondmilieu is er ook minder wondpijn. De vochtregulerende werking van het foam houdt het wondvocht vast en vermindert de kans op verweking en maceratie. De bovenzijde is voorzien van een speciale hoog zuurstof- en waterdampdoorlatende toplaag. De hoge waterdampdoorlatendheid (MVTR: Moisture Vapor Transmission Rate) is belangrijk omdat dit samen met het grote absorptievermogen zorgt voor een maximale opnamecapaciteit. Een ademend wondverband dat een goede bescherming biedt tegen invloeden van buitenaf zoals vocht, vuil en micro-organismen. De lichte zijde (= wondzijde) is duidelijk onderscheidend van de donkere bovenzijde en voorkomt vergissingen.

Kliniderm Foam zonder kleeflaag is het ideale wondverband waarbij men zelf de keuze voor fixatiemateriaal (hechtpleister, windsel of zwachtel) wil maken. Zeer geschikt indien de omliggende huid beschadigd of zeer kwetsbaar is. Kliniderm Foam zonder kleeflaag, kan naar de vorm van de wond of in speciale vormen worden geknipt (bijv. voor de behandeling van tenen, vingers, etc.). De sterke structuur van het foam voorkomt dat er resten of gel achterblijven in de wond. Dit geeft een helder zicht op de wond voor wondinspectie na het verwijderen van het wondverband.


Kliniderm Foam Border is voorzien van een hypoallergene kleeflaag voor een huidvriendelijke en zekere fixatie. Deze kleeflaag is microporeus aangebracht om te zorgen voor een open ademende structuur. De huid rondom chronische wonden is vaak teer en kan gemakkelijk beschadigen bij het verwijderen van een klevend wondverband. Deze kleeflaag is juist ontwikkeld om trauma tijdens het verwisselen te voorkomen. De zelfklevende Border-versie biedt een optimale bescherming in combinatie met een zekere en zeer huidvriendelijke fixatie. Het vastzetten op moeilijk te fixeren plaatsen wordt eenvoudiger omdat de toplaag elastisch is en zich gemakkelijk laat vormen naar de vorm van het lichaam. De waterafstotende toplaag maakt douchen mogelijk.



Kliniderm Foam Heel is speciaal ontwikkeld voor de preventie en behandeling van decubituswonden op de hiel. Het is zacht en comfortabel en is gemakkelijk aan te brengen. De vorm kan desgewenst bijgeknipt worden. De Kliniderm Foam Heel is met een windsel (bijv. Klinifix Cohesive) goed op de hiel te fixeren.



Vergelijk 5 gerenommeerde foamverbanden

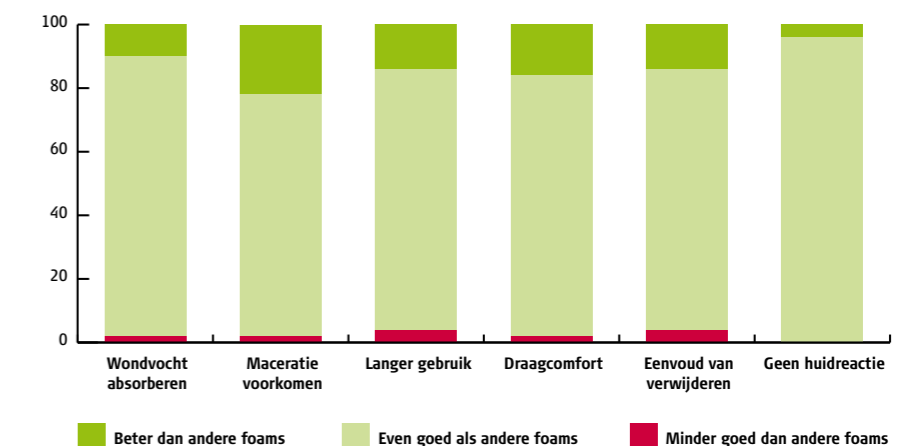

Uit vergelijkend onderzoek blijkt Kliniderm Foam meer dan 96% beter/vergelijkbaar te scoren op de belangrijkste eigenschappen ten opzichte van andere foamverbanden.