



Alcoholvrije sneldesinfectie van medische hulpmiddelen en algemene oppervlakken op basis van quaternaire ammoniumverbindingen.

## mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes

### Onze pluspunten

- gebruiksklaar
- alcoholvrij
- zeer breed werkingsspectrum
- korte inwerktijd van 1 minuut
- geschikt voor desinfectie van couveuses, (kunst)lederen behandelstoelen en andere alcoholgevoelige oppervlakken
- toelatingsnummer: Nederland 13744N

### Toepassingsgebied

Voor de desinfectie van medische hulpmiddelen en toebehoren [CE 0297] en algemene oppervlakken. Bijzonder geschikt voor alcoholgevoelige oppervlakken (waaronder plexiglas en ultrasoon toebehoren). Niet gebruiken op (onbehandelde) oppervlakken (o.a. metalen) die gevoelig zijn voor water (i.v.m. kans op roestvorming).

### Gebruiksaanwijzing

#### A WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT ALS BIOCIDEN

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en omkapselde virussen op harde oppervlakken:

- in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg;
- ruimtes bestemd voor het verblijf van mensen;
- productie ruimtes in de farmaceutische en cosmetische industrie;
- transportmiddelen bestemd voor mensen.

met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

#### B GEBRUIKSAANWIJZING ALS BIOCIDEN

**Algemeen:** met name geschikt voor toepassing op oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol, zoals leder, PVC en acrylglas etc.

**Toepassing:** de te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen, zodanig dat geen zichtbaar vuil aanwezig is. Bevochtig de te behandelen oppervlakken met de geïmpregneerde doekjes en zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven. Na gebruik de verpakking goed afsluiten. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken. Dosering: 1 doekje is geschikt voor circa 0,5 m<sup>2</sup> oppervlak. Minimale inwerktijd: 1 minuut.

**GEBRUIK MEDISCHE HULPMIDDELEN:** Niet geschikt voor einddesinfectie van semikritische en kritische medische hulpmiddelen. Veeg oppervlak grondig af. Bevochtig de te behandelen oppervlakken met de geïmpregneerde doekjes en zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven. mikroZid<sup>®</sup>sensitive wipes is een ready to use product. Minimale inwerktijd: 1 minuut. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

CE 0297



# mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes

## Productinformatie

Samenstelling:  
100 g mikrozid<sup>®</sup> sensitive oplossing bevat de volgende werkzame bestanddelen.

0,26 g Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride; 0,26 g didecyldimethylammoniumchlorid, 0,26 g quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, chloride

### Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Dichtheid	circa 1,00 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C / van de werkzame stof
Kleur	kleurloos
pH	5 - 8 / 100 % / 20 °C / van de werkzame stof
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	Niet van toepassing
Vorm	Waterachtig oplossing van nonwoven

## Verwante producten

- mikrozid<sup>®</sup> AF wipes
- mikrozid<sup>®</sup> universal wipes green line

## Milieu

schülke producten worden vervaardigd onder vooruitstrevende, veilige, spaarzame en milieuvriendelijke omstandigheden. Wij houden hoge kwaliteitseisen in acht.

## Expert reports en informatie

Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de mikrozid<sup>®</sup>sensitive producten is terug te vinden op internet via [www.schuelke.nl](http://www.schuelke.nl).

Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux kantoor : 0031 (0)23 5352634 of internationaal 0049 (0)40 521 00 666.

## Speciaal advies

Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen. Etikettering overeenkomstig EG-richtlijnen. Zie veiligheidsinformatieblad. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Zie veiligheidsinformatieblad voor gevaren- en veiligheidsadvies.

## Bestelinformatie

Artikel	Eenheid	Artikel nr.
mikrozid sensitive wipes prem 100 ST SP	6/Doos	70000807
mikrozid sensitive wipes prem 100 ST SP	6/Doos	70003108
mikrozid sensitive wipes prem 50 ST SP	12/Doos	70000806
mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT	12/Doos	70001404
mikrozid sen. Wipes -Ref-NL- 200 ST BT	12/Doos	70001451
mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT	12/Doos	70003109
mikrozid sens wipes Jum Ref NL 200 ST BT	12/Doos	70003145
mikrozid sensitive wipes Jumbo 200 St DS	10/Doos	109184
mikrozid sensitive wipes -NL- 200 ST DS	10/Doos	165706
mikrozid sensitive wipes 120 ST DS	10/Doos	70000810
mikrozid sensitive wipes Jumbo 200 ST DS	10/Doos	70003104
mikrozid sensitive wipes NL 200 ST DS	10/Doos	70003144

## Accessoires

Accessoires	Artikel nr.
Wandhouder voor mikrozid jumbo bussen	134421



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.

**schülke Benelux**  
Schülke & Mayr Benelux B.V.  
Oudeweg 8d  
2013 CC Haarlem, Nederland  
Tel: +31 (0) 23 535 26 34  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[salesbenelux@schuelke.com](mailto:salesbenelux@schuelke.com)

**schülke hoofdkantoor**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Duitsland  
Tel: +49 40 - 52100 - 0  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)