

Kliniderm Film Xtrata steriel

Transparante wondfolie – Extra vriendelijk voor de huid

Xtrata, lipo-gel kleeftechnologie

Alle Xtrata-producten zijn voorzien van een nieuw, revolutionair type kleeflaag.

Toepassingen Kliniderm Film Xtrata steriel

- oppervlakkige, weinig vocht afgevend wonden zoals schaafwonden, brandwonden, skin tears, donorsites
- postoperatieve wonden
- fixatie van canules, drains en catheters

Extra voordelen van Kliniderm Film Xtrata*

- speciaal geschikt voor de probleemhuid en gevoelige huid van bijvoorbeeld ouderen, kinderen, dialyse- en oncologiepatiënten
- uitstekende kleefkracht
- pijnloos te verwijderen
- uiterst minimale hoornlaagverwijdering
- hoge waterdampdoorlaatbaarheid (MVTR 2000 g/m²/24H)

* De voordelen van de Kliniderm Film (z.o.z.) zijn ook van toepassing op de Kliniderm Film Xtrata.

Gebruiksaanwijzing Xtrata steriel


- verwijder gedeeltelijk het eerste schutvel nr. 1 van de kleeflaag en breng het verband aan (1)
- verwijder nu beide schutvellen nr. 1 en 2. Druk het verband stevig aan om het goed aan de huid te laten hechten (2)
- verwijder tenslotte het transparante schutvel nr. 3 aan de bovenzijde van de folie (3)



De flexibele lipo-gel kleeflaag vormt zich volledig naar het ruwe oppervlak van de huid, wat zorgt voor een stevige kleefkracht terwijl de schade aan het stratum corneum bij het verwijderen van de pleister drastisch wordt teruggebracht. De vloeibaarheid van de lipo-gel en de enorme vochtdoorlaatbaarheid van de kleeflaag resulteren in een unieke en zeer huidvriendelijke kleeflaag.

Xtrata

Zeer geringe beschadiging stratum corneum

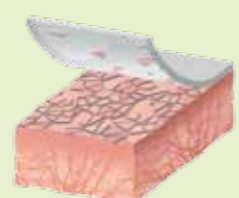

20% van stratum corneum verwijderd

Traditionele kleeflaag

Substantiële huidbeschadiging door verwijdering stratum corneum



89% van stratum corneum verwijderd

De buitenste laag van de huid, de stratum corneum, heeft een belangrijke barrièrefunctie. Beschadiging van deze laag door het gebruik van pleisters maakt de huid gevoelig voor het ontstaan van irritatie en diverse andere huidklachten.



Microscopische opname van het kleefoppervlak van de pleister na verwijdering. Toepassingsgebied: borst. Duur van applicatie: 6 uur (Vergroting: x50).

ASSORTIMENT

REF-nummer	Maat	Verpakking	Inhoud overdoos	ZI-nummer	Memocode
Kliniderm Film Xtrata Steriel					
4291409	6 x 9 cm	100 x 1	5 x 100 x 1	15102742	KLINF6
4291413	10 x 13,5 cm	50 x 1	6 x 50 x 1	15102750	KLINF1

Kliniderm Film Xtrata onsteriel

Transparante wondfolie – Extra vriendelijk voor de huid

Toepassingen Kliniderm Film Xtrata onsteriel op rol

- bescherming van de huid bij wrijving of vocht
- secundair wondverband bij hydrogels en alginaten
- waterdicht afdekken van wondbedekkers

Gebruiksaanwijzing Xtrata onsteriel op rol

- knip de gewenste lengte van de rol (1)
- verwijder de papieren beschermlaag waardoor de kleeflaag vrijkomt (2)
- houd de kleeflaag boven de huid of wondbedekker en breng de folie aan. Druk het verband stevig aan om het goed aan de huid te laten hechten (3)
- verwijder tenslotte het transparante schutvel aan de bovenzijde van de folie vanuit de split in het midden (4)



ASSORTIMENT

REF-nummer	Maat	Verpakking	Inhoud overdoos	ZI-nummer	Memocode
Kliniderm Film Xtrata Onsteriel op rol					
4291405	5 cm x 10 m	1 rol	20 x 1	15102718	KLINF1
4291410	10 cm x 10 m	1 rol	20 x 1	15102726	KLINF1
4291415	15 cm x 10 m	1 rol	20 x 1	15102734	KLINF1



Medeco B.V. Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland | Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland
Telefoon (0186) 63 44 00 | Fax (0186) 61 68 93 | info@medeco.nl | www.medeco.nl

Kliniderm Film

De glasheldere aanpak

FW 18090-01 | Druk- en zelfklevende voorbehoeders. Medeco behoudt zich, te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.



Kliniderm Film

Transparante wondfolie

Toepassingen


- oppervlakkige, weinig vocht afgevend wonden zoals schaafwonden, brandwonden, skin tears, donorsites
- postoperatieve wonden
- bescherming van de huid bij wrijving of vocht
- secundair wondverband bij hydrogels en alginaten
- fixatie van canules, drains en catheters

Voordelen

- voortdurende wondinspectie mogelijk door transparante folie
- onderhoudt vochtig wondmilieu; heeft gunstig effect op het genezingsproces
- hoge verdamping voorkomt vochtophoping onder de folie
- barrière voor virussen en bacteriën
- soepel en rekbaar; dus vormt zich gemakkelijk naar de lichaamscontouren
- waterbestendig; dus douchen is mogelijk
- huidvriendelijke kleeflaag
- eenvoudige applicatie
- steriel

Gebruiksaanwijzing

- verwijder het grootste schutvel van de kleeflaag (1). Gebruik beide stroken aan de zijkant voor het eenvoudig aanbrengen op de wond
- breng de folie zonder spanning aan op de wond (2)
- verwijder daarna het schutvel van de zijstroken, en druk de folie aan op de huid rondom de wond (3)
- verwijder nu ook de beschermende toplaag door voorzichtig de beide uitstekende uiteinden weg te trekken in de richting van de groene pijlen (4)
- bij het verwijderen van de Kliniderm Film pelt u voorzichtig, vanuit de hoeken, het verband van de huid waarbij u met de vrije hand de huid ondersteunt. Trek de folie evenwijdig met de huid los
- Kliniderm Film kan tot 7 dagen blijven zitten

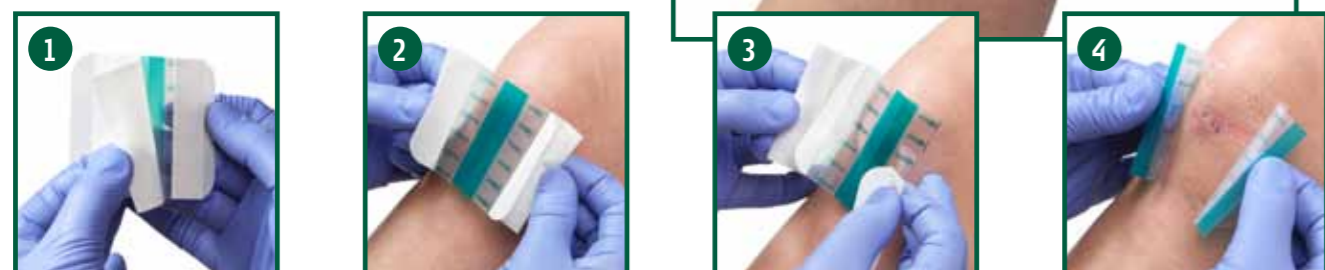

ASSORTIMENT					
REF-nummer	Maat	Verpakking	Inhoud overdoos	ZI-nummer	Memocode
4174402	6 x 7 cm	10 x 1	45 x 10 x 1	14632071	KLINF6
4174403	10 x 12 cm	10 x 1	28 x 10 x 1	14632098	KLINF1
4174404	15 x 20 cm	10 x 1	14 x 10 x 1	14632101	KLINF1
4174405	15 x 30 cm	10 x 1	7 x 10 x 1	14997568	KLINF3

Kliniderm Film Plus

Transparante wondfolie met absorberend wondkussen

Toepassingen

- licht tot matig vochtafgevend wonden
- schaaf- en snijwonden
- postoperatieve wonden

Voordelen Kliniderm Film Plus

- absorberend wondkussen voorzien van niet verklevende contactlaag
- ronde hoeken, blijft dus beter zitten
- goed vochtmanagement
- ondoorlaatbaar voor virussen en bacteriën
- gebruiksvriendelijk door eenvoudige aanbrengmethode
- discrete en onopvallende pleister: verhoogt patiëntcomfort
- douchen is mogelijk

Gebruiksaanwijzing

- kies de juiste maat Kliniderm Film Plus aan de hand van de afmeting van de wond. Op de Kliniderm Film Plus-verpakking staat de afmeting van het wondkussen vermeld. Voor een optimaal resultaat moet het verband groot genoeg zijn, zodat het rondom op de droge, gezonde huid kan kleven
- zorg ervoor dat de huid goed droog is voor een optimale hechting



ASSORTIMENT						
REF-nummer	Maat	Maat wondkussen	Verpakking	Inhoud overdoos	ZI-nummer	Memocode
174410	5 x 7.2 cm	2.8 x 3.8 cm	50 x 1	10 x 50 x 1	15410854	KLINF5
174411	5 x 7.2 cm	2.8 x 3.8 cm	5 x 1	40 x 5 x 1	15410846	KLINF5
174412	10 x 10 cm	5 x 5 cm	50 x 1	6 x 50 x 1	15410870	KLINF1
174413	10 x 10 cm	5 x 5 cm	5 x 1	32 x 5 x 1	15410862	KLINF1
174414	10 x 15 cm	5 x 10 cm	20 x 1	8 x 20 x 1	15410889	KLINF1
174415	10 x 20 cm	5 x 15 cm	20 x 1	12 x 20 x 1	15410897	KLINF1
174416	10 x 25 cm	5 x 20 cm	20 x 1	10 x 20 x 1	15410900	KLINF1
174417	10 x 30 cm	5 x 25 cm	20 x 1	8 x 20 x 1	15410919	KLINF1

- trek de beide schutvellen aan de achterzijde van het verband los zodat het wondkussen zichtbaar wordt (1)
- breng het verband zonder spanning aan op de wond en druk ondertussen de randen van de film goed aan (2)
- verwijder tenslotte het buitenste transparante schutvel door vanaf de blauwe strook aan de zijkant, met het verband mee te trekken (3)
- bij het verwijderen van de Kliniderm Film pelt u voorzichtig, vanuit de hoeken, het verband van de huid waarbij u met de vrije hand de huid ondersteunt. Trek de folie evenwijdig met de huid los
- Kliniderm Film Plus moet vervangen worden als het wondkussen verzadigd is. De behandelde plaats moet regelmatig nagekeken worden op tekenen van infectie. Frequentie van de verbandwisseling hangt dus af van de ontwikkeling van de wondgenezing



Kliniderm Film IV

IV fixatiepleister

Toepassingen

- fixeren van intraveneuze canules en centrale lijnen

Voordelen Kliniderm Film IV

- voortdurende inspectie mogelijk van de insteekopening door transparante folie
- ondoorlaatbaar voor virussen en bacteriën
- los wondkussen onder canule voorkomt drukplek en absorbeert wondvocht
- gebruiksvriendelijk door eenvoudige aanbrengmethode met split
- nonwoven verstevigde fixatiestroken langs de split vereenvoudigen applicatie en zorgen voor een stevige en veilige fixatie van de canule
- hoge verdamping voorkomt vochtophoping onder de folie
- douchen is mogelijk

Gebruiksaanwijzing

- zorg ervoor dat de huid goed droog is voor een optimale hechting
- plaats het losse wondkussen onder de canule om de huid te beschermen (1)
- verwijder papieren schutvel nr. 1 aan de achterzijde en breng de infuuspleister aan op de canule; zorg dat de insteekopening zichtbaar is (2)



ASSORTIMENT						
REF-nummer	Maat	Maat wondkussen	Verpakking	Inhoud overdoos	ZI-nummer	Memocode
174420	8 x 5.5 cm	2 x 2 cm	50 x 1	48 x 50 x 1	15410927	KLINF8



- verwijder transparante schutvel (met blauwe rand) aan bovenzijde nr. 2 (3)
- verwijder één voor één de schutvellen van de fixatiestroken nr. 3 en fixeer de canule stevig (4)
- Kliniderm Film IV elke 3-5 dagen verwisselen
- de insteekopening van het infuus moet verder regelmatig nagekeken worden op tekenen van infectie. Raadpleeg dan een arts

