

Gewoon duidelijk




Teststrip invoeren

Neem een Accu-Chek® Performa teststrip uit de flacon en sluit de flacon. Voer de teststrip in de meter. De meter gaat automatisch aan.



Display vermeldingen

In de display verschijnt het teststripsymbool en een knipperend bloeddruppelsymbool.

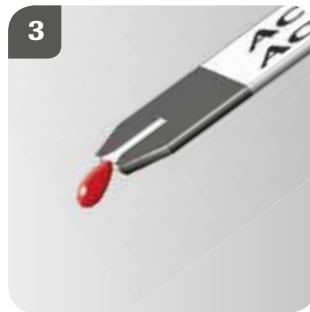

Bloed aanbrengen

Houd de bloeddruppel tegen de uitsparing aan de voorkant van het gele testveld van de teststrip. Zodra de meter piept, is er voldoende bloed opgezogen door de teststrip.



Resultaat aflezen

Binnen 5 seconden verschijnt het resultaat. Indien gewenst kan nu een markering meegegeven worden aan het resultaat. Verwijder hierna de teststrip uit de meter. De meter gaat automatisch uit.



Meer details?

Raadpleeg de Accu-Chek® Performa handleiding

Wel een druppeltje bloed, geen venijnige pijn



1 Prikdiepte instellen

Met behulp van de voorste dop stelt u de prikdiepte op uw persoonlijke huiddikte in.



2 Dop eraf halen

Haal de dop van de prikpen om het lancet te plaatsen.



3 Lancet plaatsen

Plaats het lancet tot deze duidelijk vastklikt. Draai daarna het beschermkapje van het lancet en plaats het dopje terug op de prikpen.



4 Prikpen aanspannen

De ontspanknop is nu geel gekleurd.



5 Bloed prikken

Zet de prikpen tegen uw vinger en druk op de gele ontspanknop.



6 Lancet uitwerpen

Haal de voorste dop van de prikpen. Door het uitwerpmechanisme naar voren te schuiven valt het gebruikte lancet eruit.



Ga voor meer informatie naar www.accu-chek.nl of bel 0800 - 022 05 85 (gratis).